


## Hoe de Kardia gebruiken?

- Installeer de Kardia app van AliveCor Inc.

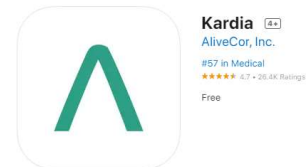

### Handleidingen

- <https://www.alivecor.com/previous-labeling/kardiamobile/00LB24.3%20Dutch.pdf>
- <https://www.kardia.com/assets/old/ifus/kardiamobile6l/19LB06.04-nl.pdf>



10

## Hoe de Kardia gebruiken?

- Kies geen betaalde account
- **Let op bij installatie – de gebruiker als persoon = praktijk**
  - Gebruiker = voornaam
  - Voornaam = naam van de praktijk
  - Achternaam = HAP
  - Koppel aan eigen werkmail of praktijkmail
  - Maak fictieve geboortedatum aan (1-1-2000),
  - Geslacht, Lengte en gewicht (© 1.80m 80kg)



11

## Hoe de Kardia gebruiken?

### Bij de installatie


- Iphone: bluetooth aan
- Android: installeer pdf lezer (adobe reader)
- Telefoon vraagt soms NFC uit te zetten
- Telefoon vraagt soms microfoon aan te zetten
- Houd de Kardia dicht bij de hand



12

## Hoe de Kardia gebruiken?

- 'Λ' symbool wijst naar telefoon
- Kardia heel dichtbij
- Goed contact = Great Signal
- Vochtige vingers
- Niet drukken, rustig houden
- Niet bewegen
- Niet praten

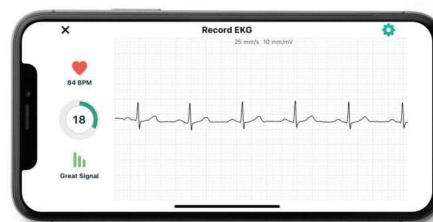

13



## Hoe de Kardia te gebruiken?

- Tips bij veel ruis
  - Blijf uit de buurt van elektrische apparaten, zoals computer of TV, etc
  - Vermijd omgevingsgeluid
  - Sluit geen koptelefoon oid aan
  - Gehoorapparaat = uitzetten
  - Ontspan de handen/vingers, maak de vingers vochtig



14



## Hoe de Kardia gebruiken?

- Afwijkende registratie?
- Maak afspraken in de praktijk
  - De huisarts doet de teleconsultatie met cardioloog
  - Sla een afwijkende registratie altijd op in het patiëntendossier (HIS)
  - Kardia app genereert een pdf (iphone/adobe reader)
  - Android: ECG-pdf kan per mail gestuurd worden naar praktijkmail
  - iOS/iphone: ECG-pdf kan via 'deel icon' verstuurd worden per mail of een app zoals Whatapp of Siilo app naar de huisarts
  - Kies bij versturen wachtwoord 'overslaan' (nl anonieme registratie)



15